

DENTIRO® Wipes

DÉSINFECTION DES SURFACES

Lingettes désinfectantes pour petites surfaces entièrement virucides et avec une basse teneur en alcool.



- ▶ **Efficace contre 101 micro-organismes**
- ▶ **Agit en 60 secondes**
- ▶ **Compatible avec plus de 275 matériaux, y inclus les cuirs artificiels**
- ▶ **Séchage sans résidus**
- ▶ **Testé selon 18 normes européennes**

DENTIRO® Wipes sont des lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi pour une désinfection et un nettoyage sans résidu des petites surfaces des dispositifs médicaux non invasifs comme les tables d'opération, les brancards, les tiges à perfusion et les fauteuils dentaires. Avec une faible teneur en alcool de moins de 50%, les lingettes très imbibées sont non seulement compatibles avec du matériel fragile mais réduisent également les risques d'allergies. DENTIRO® Wipes sont sans aldéhyde et biodégradables.

Portée d'application

- ▶ Pour une désinfection rapide et le nettoyage de petites surfaces de dispositifs médicaux, tables d'opération, tuyaux d'aspiration, pièces à main, contre-angles, griffes de lampe et d'équipement médical en matériaux comme l'aluminium, le cuivre, le caoutchouc et le plastique tel que le PVC et le verre d'acrylique

Utilisation

Mouiller complètement les surfaces et les objets à désinfecter et laisser agir. Respecter le temps d'action. Si nécessaire, essuyer la surface ou l'objet avec un chiffon doux à usage unique. N'appliquer que sur les matériaux tolérant l'alcool. Pour les matériaux délicats, tester la compatibilité avant l'usage en appliquant le produit sur une petite surface discrète.

Composition pour 100 g : 31.3 g d'éthanol, 16.7 g d'isopropanol

Spectre d'efficacité / délais d'exposition

Bactéricide	15 secondes
Bactéries résistantes aux antibiotiques	15 secondes
Tuberculocide	60 secondes
Mycobactéricide	60 secondes
Levuricide	15 secondes
Levures résistantes aux antibiotiques	15 secondes
Fongicide	60 secondes
Virus enveloppés	15 secondes
BVDV	15 secondes
Coronavirus	15 secondes
Virus de l'hépatite B	15 secondes
Virus de l'hépatite C	15 secondes
Virus de l'herpès simplex	15 secondes
VIH	15 secondes
Virus de la grippe A	15 secondes
Virus de la vaccine	15 secondes
Virus non-enveloppés	60 secondes
Adénovirus	60 secondes
Entérovirus bovin	60 secondes
Norovirus	60 secondes
Poliovirus	60 secondes
Rotavirus	30 secondes

Conforme aux normes EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 1656, EN 1657, EN 13610, EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14204, EN 14348, EN 14349, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14615, EN 14675, EN 16615, directives RKI / DVV, CE 1250. Testé dermatologiquement.

Conditionnement : 120 lingettes / recharges



SAS Dentea
 Téléphone : +33 (0)6 48 46 10 75 / +33 (0)6 73 26 33 28
 Mail : contact@societe-dentea.fr
www.societe-dentea.fr