

Aiguille Easyslide :

De qualité supérieure pour une prestation constamment élevée

Les aiguilles Easyslide sont le résultat de recherches approfondies en technologie métallurgique et d'expérience clinique. Conception spécifique de la pointe et de la géométrie de l'aiguille. Grande qualité d'alliage 300 Quality Steel.

Easyslide



Easyslide est synonyme d'un affûtage durable pour aiguilles – du premier au dernier point – permet ainsi, une suture rapide avec un minimum de consommation de matériel. La pointe de précision permet des résultats de suture sûrs et atraumatiques et d'excellents résultats.

- Pas de déformation
- Pas de cassure de l'aiguille
- Un tranchant permanent de l'aiguille : pénétration constante dans le tissu, jusqu'au dernier point
- Géométrie précise de la pointe : excellente capacité de pénétration
- Passage intratissulaire en douceur
- Glissement régulier, précis et atraumatique de l'aiguille à travers le tissu
- Traitement de surface : améliore la pénétration de l'aiguille



RacePack :

BBraun a mis au point son conditionnement de sutures à travers des partenariats de long terme avec des équipes chirurgicales du monde entier.



Système de conditionnement simplifié des sutures :

- Réduction de l'effet mémoire grâce à son bobinage en cercle
- Identification simple du produit
- Accès direct aux sutures, gain de temps pour le personnel du bloc



Étape de manipulation :



Ouverture de l'emballage extérieur non stérile
Large zone de préhension



Transfert du RacePack vers la zone stérile



Préhension de l'aiguille dans l'emballage avec la porte aiguille




Extraction de la suture en tirant vers la droite

Différents types d'aiguilles :

Pour distinguer les différents types d'aiguilles :

Courbure de l'aiguille		Corps de l'aiguille		Pointe de l'aiguille		Longueur de l'aiguille	Précisions	
D	3/8 cercle	R	rond	T	diamant	Correspond à la distance entre la pointe de l'aiguille et la zone de sertissage, distance mesurée le long de l'aiguille en mm.	f	aiguille flat
H	1/2 cercle	S	triangulaire	C	micropointe		s	aiguille renforcée
				MP	pointe de précision		ss	très renforcée
							v	aiguille sécable
							v	aiguille noire
H		R		C		26		


HRC 26 : Aiguille 1/2 cercle à corps rond avec pointe triangulaire micropointe, longueur 26 mm

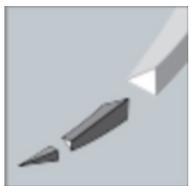

Aiguille DS : 3/8 de cercle
Triangulaire tranchante sur l'extérieur



Aiguille de section triangulaire avec un apex à bord tranchant sur l'extérieur de la courbure de l'aiguille. Conçue pour pénétrer dans les tissus

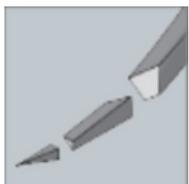

Aiguille DSMP : 3/8 de cercle
Triangulaire pointe de précision à corps aplati



Aiguille présentant une géométrie spécifique à pointe fine et un apex à bord tranchant sur l'extérieur. Le corps s'aplatit progressivement après la pointe de l'aiguille pour une plus grande stabilité dans le porte-aiguille.



Aiguille HR : 1/2 cercle
Ronde



L'aiguille ronde est conçue pour permettre une pénétration aisée des tissus. Le corps de l'aiguille est aplati pour empêcher l'aiguille de tourner dans le porte-aiguille. Convient parfaitement aux tissus mous. Résistance accrue à la flexion.



Aiguille DRC : 3/8 de cercle
Ronde avec micro pointe




Cette aiguille ronde avec l'extrémité de la pointe triangulaire améliore la pénétration dans les vaisseaux calcifiés et les tissus scléreux. L'aiguille CV Pass avec son corps scléré et non aplati permet une résistance accrue à la flexion.



Aiguille DRT : 3/8 de cercle
Ronde avec pointe de diamant



Aiguille avec pointe tranchante robuste à quatre arêtes qui se prolonge par un corps rond effilé. Cette aiguille assure une bonne pénétration dans les tissus scléreux avec un trauma tissulaire minime.

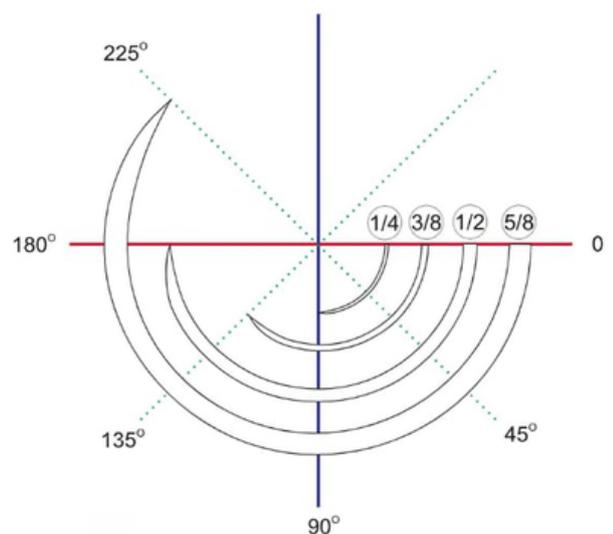

Codage des articles permettant l'identification du contenu des boîtes :

M = Boîte de 6

G = Boîte de 12


B = Boîte de 24

C = Boîte de 36

Monosyn Quick

Contre-indications :

Le monosyn quick est contre-indiqué pour le rapprochement de tissus soumis à des tensions et pour la fixation d'implants synthétiques ou d'origine biologique.

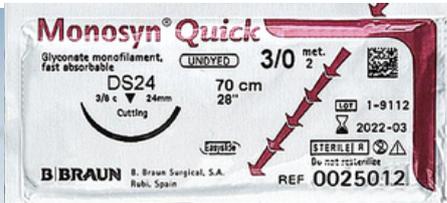

Structure	Monofilament
Couleur	Incolore
Composition	Glyconate : 72% glycolide - 14% carbonate de triméthylène - 14% caprolactone
Enduction	Non enduit
Origine	Synthétique
Tailles	USP 6/0 à USP 1/0
Résistance	80% après 5 jours
Résorption	56 jours - Court terme
Stérilisation	Irridiation Gamma

Indications

- Sutures cutanées et sous cutanées
- Chirurgie des paupières
- Muqueuses buccale

Avantages

- Résorption rapide
- Très souple : absence de mémoire
- Maniabilité supérieure

Aiguille Longueur mm	Fil Longueur cm	6/0	5/0	4/0	3/0
DS 12 	45 70 Incolore		*C0025135 C0025323	C0025136 C0025304	C0025169
DS 16 	45 70 Incolore		C0025125 C0025331	C0025126 C0025332	C0025333
DS 19 	45 70 Incolore		C0025001 C0025005	C0025002 C0025006	C0025003 C0025007
DS 24 	45 70 Incolore			C0025001	C0025351 C0025012
DSMP 11 	45 Incolore	C0025020			

Aiguille : **Easyslide**

Aiguille **Sarlat**

Sertissage **Barcelona**

RacePack :

*Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement 8 à 12 semaines

C = Boîte de 36