

ORO CLEAN® Liquid

NETTOYANT DES UNITÉS D'ASPIRATION

Nettoyant puissant mais doux pour les systèmes d'aspiration dentaire.

- **Excellente puissance de nettoyage**
- **Formule non moussante**
- **Concentration d'application de 2%**
- **Excellent rapport qualité/prix**

ORO CLEAN® Liquid est un concentré puissant pour le nettoyage et la désodorisation des systèmes d'aspiration dentaire, des crachoirs et des séparateurs d'amalgame. La combinaison intelligente d'ingrédients actifs a abouti à une formule non moussante qui élimine et empêche la formation de dépôts de craie, de sang et de biofilm sans effort, sans endommager les systèmes d'aspiration. ORO CLEAN® Liquid a une touche d'odeur de menthe poivrée. Parfait pour le nettoyage hebdomadaire.

Portée d'application

- Pour le nettoyage des systèmes d'aspiration, crachoirs et séparateurs d'amalgame

Utilisation

Nettoyer les unités d'aspiration hebdomadairement ou selon les réglementations locales. Rincer l'unité d'aspiration abondamment avec de l'eau après des procédures chirurgicales et avant le nettoyage. Préparer 2 litres de solution active selon les instructions indiquées sur l'étiquette frontale. Pour mesurer le correct dosage, utiliser le couvercle comme instrument de mesure. Aspirer 1.5 litres de solution active en utilisant le doseur OROCLEAN® Cup et verser les 500 ml restant dans le crachoir. Laisser agir. Rincer abondamment à l'eau claire après le nettoyage. Non compatible avec l'aluminium, le cuivre, l'acier galvanisé et le polyuréthane.

Composition pour 100 g : composés de nettoyage alcalins, des agents antimoussants, des tensio-actifs spéciaux



SAS Dentea
Téléphone : +33 (0)6 48 46 10 75 / +33 (0)6 73 26 33 28
Mail : contact@societe-dentea.fr
www.societe-dentea.fr



Conditionnement : bidon 2 litres

